

# Algoritmo de diagnóstico del FIV

**Prueba SNAP\* Feline Triple\*, Prueba SNAP\* FIV/FeLV Combo o prueba SNAP\* FIV/FeLV Combo Plus Test**

**Positivo para anticuerpos frente al FIV†**

**Negativo para anticuerpos frente al FIV**

< 6 meses de edad

> 6 meses de edad

Considerar sin infección‡

Los anticuerpos maternos contra el FIV pueden tardar hasta 6 meses en desaparecer

Confirmar el resultado positivo para el FIV mediante otra tecnología (anticuerpo del FIV con ELISA, prueba del FIV RealPCR\* o VIF con Western Blot)

Repetir la prueba a los 60 días si el riesgo de exposición reciente es elevado

Considerar la prueba del FIV RealPCR\* o repetir la prueba de anticuerpos del FIV cuando el gatito tenga más de 6 meses de edad

**Positivo**  
(anticuerpo del FIV con ELISA, prueba del FIV RealPCR o FIV con Western Blot)

**Negativo**  
(Anticuerpo del FIV con ELISA o prueba del FIV RealPCR)

**PCR positiva**

**PCR negativa**

Infección por el FIV confirmada

Estado de FIV incierto: considerar Western Blot

Infección por el FIV confirmada

No excluye el FIV

**Western Blot positivo**

**Western Blot negativo**

Repetir la prueba con PCR a las 8-12 semanas o la prueba de anticuerpos cuando el gatito tenga más de 6 meses de edad

Infección por el FIV confirmada

Infección por el FIV poco probable

\*La vacunación contra el FIV puede dar lugar a un resultado falso positivo. Se recomienda la PCR para estos gatos; actualmente, la disponibilidad de la vacuna contra el FIV se limita a Australia y Nueva Zelanda.

†En fase terminal de la enfermedad o en infección temprana, posible resultado falso negativo de anticuerpos; considerar PCR.